

Beurer FWM 50

Grijač za noge sa shiatsu masažom

Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

Obim isporuke: 1 grijač za noge sa shiatsu masažerom, 1 priključak, 1 uputstvo za upotrebu



1. O Shiatsu masaži

Shiatsu je oblik masaže tijela razvijen u Japanu prije 100 godina, temelji se na konceptima tradicionalne kineske medicine. Temelji se na sistemu energetskih kanala (meridijana) u ljudskom tijelu.

Cilj shiatsu masaže je unaprijediti fizičko, emocionalno i duševno stanje čovjeka. Za postizanje toga potrebno je otkloniti energetske blokade u energetskim kanalima (meridijanima) i stimulirati samo-regulatorne snage tijela.

Shiatsu terapeut to postiže tako što tečnim pokretima stvara pritisak duž energetskih kanala (meridijana). Iako Shiatsu doslovno prevedeno znači „pritisakom prstima“, terapeuti za masažu pored prstiju koriste i dlanove, laktove i koljena. Za vrijeme masaže terapeut koristi svu težinu svoga tijela kako bi postigao potreban pritisak.

Masažom određene tačke na stopalima može se utjecati na određeni organ u tijelu. Savjetujemo da prije svake masaže refleksnih zona pročitate određenu literaturu i konsultujete doktora, kako bi postigli željeni efekat.

2. O grijaču

Ovim električnim grijačem za noge sa shiatsu masažerom možete priuštiti sebi ili drugima učinkovitu i opuštajuću shiatsu masažu stopala bez ikakve pomoći. Pored intenzivne shiatsu masaže stopala, ovaj grijač ima i funkciju grijača. Ove dvije funkcije možete koristiti istovremeno ili posebno.

3. Bitne sigurnosne napomene – detaljno pročitate i sačuvajte ih za kasniju upotrebu

Ukoliko se ne pridržavate sljedećih napomena, može doći do ozljeda osoba ili oštećenja materijala (električni udar, opekotine, požar).

Slijedeće sigurnosne napomene služe ne samo zaštitu Vašeg zdravlja ili zdravlja trećih, one služe i zaštiti proizvoda. Iz tog razloga pratite ova upozorenja i po potrebi ih prosljedite trećim licima.

- Koristite grijač sam u svrhe za koje je namijenjen.
- Ovaj grijač nije namijenjen za korištenje u bolnicama.
- Ovaj grijač nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući i djecu) sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i/ili znanja, osim ako ih nadgledaju osobe koje su odgovorne za njihovu sigurnost.
- Grijač nemojte koristiti kod bespomoćnih osoba, male djece ili osoba neosjetljivih na toplotu (n.pr. dijabetičara, osoba sa promjenama na koži uzrokovanim oboljenjima ili kod osoba sa ožiljcima na mjestu primjene, nakon konzumiranja alkohola ili tableta protiv bolova).
- Grijač nemojte koristiti na mjestima koja imaju upale, ozljede ili otekline na mjestu primjene. Ako sumnjate molimo da kontaktirate Vašeg doktora.
- Predugo korištenje može izazvati opekotine na koži.
- Električna i magnetna polja, koja odašilje ovaj grijač za noge, mogu pod određenim okolnostima ometati rad Vašeg pejsmejkera. Ali je njihova snaga dosta ispod graničnih vrijednosti: jačina električnog polja: max. 5000 V/m, jačina magnetnog polja: max. 80 A/m magnetna gustoća toka: max. 0,1 Mili-Tesla. Molimo da se informišete kod Vašeg doktora ili kod proizvođača grijača za noge prije nego koristite isti.
- Ovaj grijač za noge:
 - priključiti samo na napon naveden na grijaču,
 - ne smije raditi bez nadzora,
 - nikako ne smijete uključivati u savijenom stanju,
 - nikako ne smijete priklješćavati,
 - nikako ne smijete oštro savijati,
 - nikako ne smijete upotrebljavati na životinjama,
 - nikako ne smijete koristiti u vlažnom stanju.
- Koristiti samo u suhim prostorijama.
- Nemojte vući, savijati i zavrtati kablove.
- Nemojte stavljati igle ili oštre predmete u grijač za noge.
- Ovaj grijač ne smiju koristiti djeca, jedino ako ga je prethodno podesio ili uključio jedan od roditelja ili dao upute djetetu kako se koristi grijač.
- Djecu treba nadgledati da bi osigurali da se ne igraju sa grijačem.
- Koristite samo priloženi originalni mrežni dio tipa: SO24 FV1200200.
- Ovaj grijač treba provjeriti na tragove trajalosti ili oštećenja. Ukoliko ustanovite takve znakove ili utvrdite da su kablovi oštećeni ili grijač nije korišten prema uputstvu, onda isti potpuno upotrebe treba odnijeti proizvođaču ili trgovcu na kontrolu.
- Popravke smiju vršiti samo stručna lica ili servisi ovlašteni od strane proizvođača, pošto je za popravku potreban poseban alat. Popravke od strane nestručnog osoblja mogu nastati opasnosti za korisnika.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za naš grijač, molimo da se obratite našem ovlaštenom predstavniku.

4. Upotreba prema svrsi namjene

Ovaj grijač namijenjen je za grijanje i masažu nogu kod osoba. Nemojte koristiti ovaj grijač u cipelama, jer na taj način neće te biti dovoljno osjetljivi na toplotu i uprljaćete grijač. Ovaj grijač nije namijenjen za upotrebu u bolnicama ili za komercijalnu upotrebu. Posebno se ne smije koristiti na dojenčadima, maloj djeci, osobama koje su neosjetljive na toplotu ili bespomoćnim osobama i malim životinjama. Kod prvog korištenja može se osjetiti miris plastike, koji ubrzo nestane.

5. Korištenje

5.1 Rad

- Uklonite ambalažu.
- Provjerite grijač, adapter i kabal na oštećenja.
- Grijač za noge uključite u struju tako što adapter priključite ponajprije u priključak u sredini kontrolne ploče (na poleđini grijača) i u utičnicu.
- Kabal položite tako, da Vam ne smeta.
- Za pokretanje funkcije shiatsu masaže pritisnite tipku „Massage“ na kontrolnoj ploči. Ponovo pritisnite tipku „Massage“ na kontrolnoj ploči da isključite funkciju masaže.
- Za pokretanje funkcije grijanja pritisnite tipku „☀☀☀“ Ponovo pritisnite tipku „☀☀☀“ za gašenje funkcije grijanja.
- Ukoliko je funkcija grijanja uključena, iznad simbola „☀☀☀“ svijetli crveni LED.
- Ukoliko je prevelik pritisak na masažnim glavama, funkcija masaže se gasi iz sigurnosnih razloga. Kako bi ponovo pokrenuli grijač za noge sa shiatsu masažom, izvucite kabal iz priključka na kontrolnoj ploči na poleđini grijača i ponovo ga uključite.

3.2 Automatsko isključivanje

Grijač za noge se iz sigurnosnih razloga automatski isključuje nakon 30 minuta. Kako bi ponovo uključili grijač, prvo pritisnite tipku „Massage“ ili „“ Isključite grijač za noge ili izvucite utikač (adapter) iz utičnice ako grijač nakon korištenja više nećete koristiti.

6. Čišćenje

Grijač za noge uvijek držite u čistom stanju, pošto se ne smije prati.

• **Prije čišćenja izvucite kabal iz utičnice.**

- Manje mrlje možete ukloniti pomoću vlažne krpe i eventualno nešto tečnog sapuna. Grijač za noge nemojte natapati u vodu.
- Imajte na umu da se grijač za noge ne smije prati u mašini za veš, centrifugirati ili sušiti u sušilici, čistiti u hemijskoj čistionici ili peglati.
- Futrovani materijal se može izvaditi iz grijača i prati u mašini za veš na temperaturi od 30°C. **Grijač za noge koristite tek onda kada se u potpunosti osuši.**

7. Čuvanje

Ako grijač za noge duže vrijeme ne koristite, savjetujemo da ga stavite u originalnu kutiju i čuvate u suhoj prostoriji. Prije toga, grijač se mora u potpunosti ohladiti.

8. Odlaganje

Grijač za noge odložite prema propisima za električne i elektronske stare aparate 2001/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). U slučaju pitanja molimo da se obratite vašem komunalnom poduzeću.

Ekskluzivni zastupnik i distributer za BiH:



Tel: +387 33 761 140 Fax: +387 33 761 142
Blažujski drum 24, 71000 Sarajevo, BiH
info@unalijek.com

www.unalijek.com