

# Beurer MC 5000

## Masažna fotelja

### Uputstvo za upotrebu

#### Obim isporuke

- Masažna fotelja
- kušin za sjedenje
- jastuk za leđa
- jastuk za glavu
- ručni upravljač

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka. Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.

Srdačni pozdravi,  
Vaš Beurer tim

#### Objašnjenje simbola

Slijedeći simboli se pojavljuju u uputstvu za upotrebu:

- ⚠ **Upozorenje!** Upozorenje na opasnost od povreda ili opasnosti po Vaše zdravlje.
- ⚠ **Pažnja!** Sigurnosna napomena na moguće oštećenja na uređaju/priboru.
- ℹ **Važno!** Napomena o bitnim informacijama.
- 🏠 Koristiti samo u zatvorenim prostorima.
- 🚫 Nemojte stavljati igle u uređaj.
- ▶ Upućujemo na drugo poglavlje.

#### 1. Ispravna upotreba

Ova masažna fotelja namijenjena je isključivo za masažu leđa, nogu i stopala. Poštujte sigurnosne napomene u ovom uputstvu. Uređaj koristite samo kako je to opisano u ovom uputstvu. Uređaj je namijenjen za **ličnu/privatnu upotrebu**, a ne za medicinsku ili komercijalnu.

#### 2. Sigurnosni savjeti

- Pažljivo pročitate ovo uputstvo! Nepoštivanje slijedećih uputa može uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.
- Sačuvajte ovo uputstvo i učinite ga dostupnim drugim korisnicima.
- Predajte ovo uputstvo prilikom prosljeđivanja uređaja.

#### Strujni udar

##### ⚠ Upozorenje!

- Kao i svaki drugi električni uređaj, i ovom masažnom foteljom trebate rukovati s pažnjom i oprezom kako bi spriječili rizik od strujnog udara.
- koristite samo uz isporučeni adapter i napon struje naveden na adapteru,
- nikada nemojte koristiti ako isti ili oprema na sebi ima vidna oštećenja,
- nemojte koristiti ako vidite da je pošprican vodom.
- nemojte koristiti za vrijeme nevremena.
- koristiti samo u zatvorenom prostori i zaštititi od utjecaja sunčevih zraka.
- uređaj odmah ugasite i isključite iz struje u slučaju kvara ili zastoja u radu.
- kabal nemojte ukleštiti, oštro savijati ili zavrtati.
- nemojte vući kabal iz utičnice ili iz uređaja kako bi isti ugasili.
- držite kabal podalje od vrućih površina.
- pobrinite se da fotelja, prekidač i kabal ne dođu u dodir sa vodom, parom ili drugim tečnostima.
- Stoga fotelju koristite samo suhim rukama.
- Fotelju nemojte izlagati udarcima i nemojte je bacati.

#### Popravke

##### ⚠ Upozorenje!

- Uređaj ne smijete otvarati.
- Popravke električnih uređaja vrše samo stručna lica. Nestručne popravke mogu prouzrokovati znatne opasnosti za korisnika. U slučaju popravki obratite se stručnom servisu ili ovlaštenom trgovcu. Ako ne slijedite ovo upute, garancija ne vrijedi.
- U slučaju oštećenja adaptera ili kabla, obratite se ovlaštenom trgovcu.
- Rajsveršlus na masažnoj fotelji ne smijete otvarati. On se koristi u svrhe proizvodnje.
- Nemojte stavljati oštre predmete ili igle u fotelju.

#### Opasnost od požara

##### ⚠ Upozorenje!

- Postoji opasnost od požara u slučaju nepravilne upotrebe odnosno nepridržavanja ovog uputstva!
- Ovu fotelju nikada nemojte koristiti u kombinaciji sa drugim električnim uređajima (n.pr. električnim dekama).
- Nikada ne koristite u blizini benzina ili drugih lako zapaljivih materija.
- Fotelju nikada nemojte koristiti ispod prekrivača (n.pr. deka, jastuka,...).



## Rukovanje



### Upozorenje!

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za masažu leđa, nogu i stopala kod ljudi. Ist ne može zamijeniti liječnički pregled ili tretman. Ovu masažnu fotelju nemojte koristiti ukoliko se jedna ili više od slijedeći napomena odnose na Vas.

### Fotelju sa masažerom nemojte koristiti

- kod oboljenja ili povreda u predjelu leđa (n.pr. discus prolaps),
- na djeci,
- za vrijeme trudnoće,
- za vrijeme spavanja,
- na životinjama,
- za vrijeme aktivnosti, gdje nepredviđena reakcija može biti opasna,
- ako uzimate lijekove ili sredstva, koja vode do smanjene sposobnosti zapažanja (n.pr. lijekovi protiv bolova, alkohol),
- Nikada nemojte masirati dijelove, koji su natečeni, upaljeni ili imaju ekceme.
- Uređaj nemojte koristiti ukoliko patite od neobjašnjivih bolova u želucu.
- Uređaj ima funkciju zagrijavanja masažnih glava. Osobe, koje su neosjetljive na toplotu, moraju biti veoma oprezne kada koriste ovu funkciju. Ukoliko ste nesigurni da li je ova fotelja sa masažerom pogodna za vas, molimo da kontaktirate Vašeg liječnika.

### Prije upotrebe ovog uređaja pitajte svog liječnika pogotovo ako:

- bolujete od neke ozbiljne bolesti ili ste imali operaciju na gornjem dijelu tijela,
- imate ugrađen pejsmejker, implantate ili druga pomagala,
- patite od tromboze,
- imate dijabetes,
- patite od bolova nepoznatog uzroka.

- Uređaj je predviđen isključivo sa svrhu opisanu u ovom uputstvu. Proizvođač nije odgovoran za štete uzrokovane nestručnom ili nepažljivom upotrebom.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući i djecu) sa ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobama sa nedostatkom iskustva i/ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili primaju upute od te osobe kako koristiti uređaj.
- Nemojte stavljati predmete u otvore na fotelju ili u pokretne dijelove masažera. Osigurajte da sa pokretni dijelovi masažera uvijek slobodno kreću.
- Nemojte stavljati dijelove tijela, posebno prste, u rotirajuće masažne glave i držače u uređaju.
- Djecu treba nadzirati da se ne igraju s uređajem.
- Nakon upotrebe, ovu masažnu fotelju ugasite putem ručnog upravljača.
- Kabal postavite tako da Vam ne smeta.
- Nikada nemojte stajati na masažnu fotelji ili stavljati neke druge stvari na nju.
- Nikada nemojte masirati dijelove sa upalama, nateklinama ili ekcemima.
- Ovu fotelju može koristiti samo jedna osoba odjednom.
- Maksimalna nosivost uređaja je 200 kg.



### Pažnja!

- Uređaj zaštitite od direktnog uticaja sunčevih zraka.
- Uređaj nemojte koristiti na temperaturama višim od 40 stepeni.
- Ako uređaj niste koristili duže vrije, prije ponovnog korištenja provjerite ispravnost uređaja.

## 3. Upoznajte masažnu fotelju

Sa Beurer-ovom MC5000 masažnom foteljom možete da uživati u masaži kod kuće.


Ova masažna fotelja nudi Vam ugodnu i opuštajuću masažu.

Ova fotelja nudi tri različita masažna programa sa različitim akcentima.

Uz to, ova masažna stolica ima masažu pomoću zraka pod pritiskom u području sjedenja, listova i stopala.

## 4. Opis fotelje




### Vanjska strana

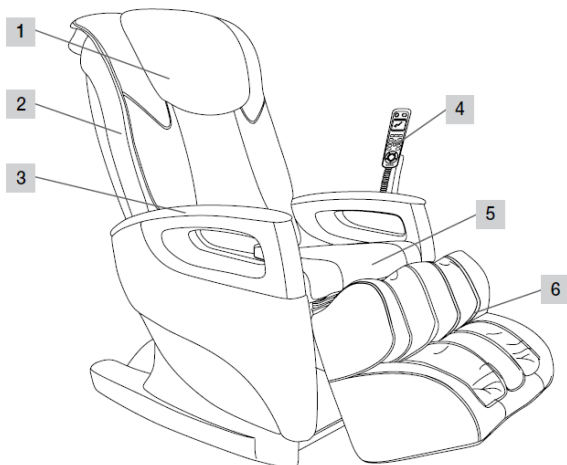


- 1 jastuk za glavu
- 2 naslonjač za leđa
- 3 naslon za ruke
- 4 ručni upravljač
- 5 kušin za sjedenje
- 6 naslon za noge
- 7 glavni prekidač
- 8 priključak za struju

### Unutrašnja struktura

- 9 Masažni valjci
- 10 Lokacije masaže sa vazduhom pod pritiskom

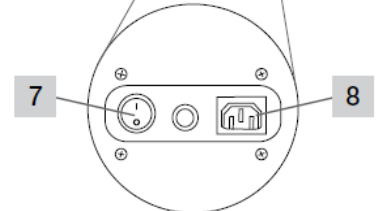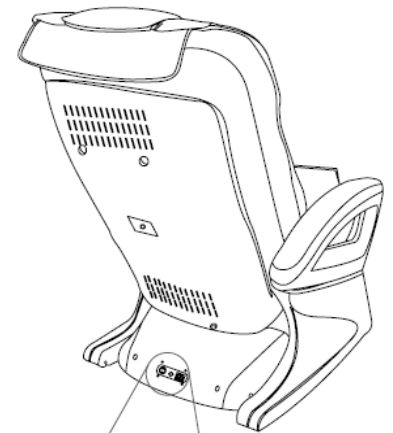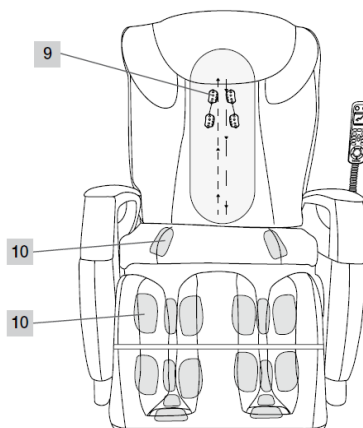

## Ručni upravljač

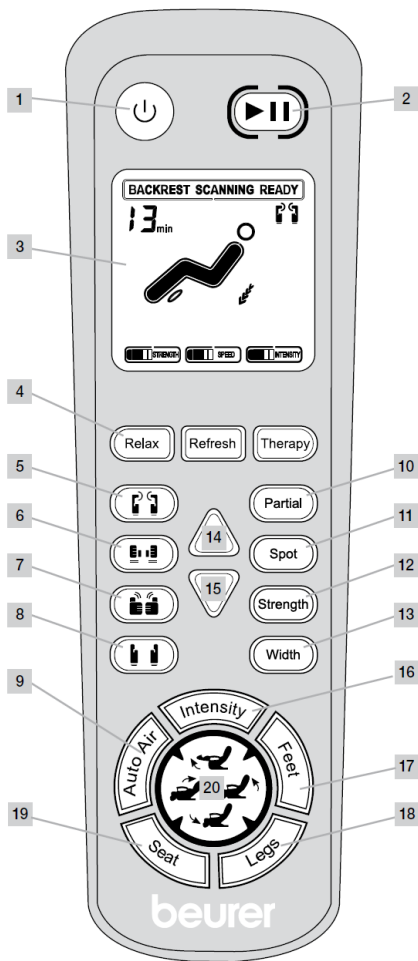

- 1 Tipka Ein/Aus (on/off)
- 2 Tipka Pause (pauza)
- 3 Display (ekran)
- 4 Automatski masažni programi
- 5 Masaža gnječenjem
- 6 Masaža lupkanjem
- 7 Shiatsu masaža
- 8 Rotirajuća masaža
- 9 Automatski program masaže vazduhom pod pritiskom
- 10 Partial (djelomična masaža)
- 11 Spot (punktuelna masaža)
- 12 Strength (jačina-intenzitet masaže gnječenjem i udarcima)
- 13 Width (rastojanje između masažnih valjaka)
- 14 Pozicija valjaka prema gore
- 15 Pozicija valjaka prema dolje
- 16 Intenzität (=intenzitet) (masaža pomoću vazduha pod pritiskom)
- 17 Feet (=stopala) (masaža pomoću vazduha pod pritiskom, stopala)
- 18 Legs (=noge) (masaža pomoću vazduha pod pritiskom, snoge)
- 19 Seat (sjedalo) (masaža pomoću vazduha pod pritiskom, sjedalo)
- 20 Poziciona tipka
  - Naslon za noge prema gore
  - Naslonjač za leđa prema gore
  - Naslon za noge prema dolje
  - Naslonjač za leđa prema dolje

### Funkcije tipki na ručnom upravljaču

Tipka Ein/Aus (on/off)



- pritisnite tipku Ein/Aus (on/off)
  - Fotelja sa masažom je spremna za korištenje.

Tipka Pause (pauza)



- pritisnite tipku Pause
  - Trenutni program se zaustavlja. Sada je masažna fotelja u Standby-modusu.
- Još jednom pritisnite tipku
  - Program se nastavlja na mjestu gdje je prethodno zaustavljen.

Ekran



Ekran prikazuje funkcije koje su aktualno uključene i aktualne postavke.

- Aktualni masažni program
- Aktualne postavke za Strength i Intensity
- Aktualnu poziciju masažnih valjaka
- Preostalo vrijeme masaže

### Masažni programi

- Masaža zrakom pod pritiskom se može odvojene priključiti ili isključiti.
- Masažna fotelja nakon isteka masažnog programa prelazi u Standby- modus.
- Masažu je moguće prekinuti u svakom trenutku. U tu svrhu pritisnite ponovno tipku za masažu.
- Masažu je moguće zaustaviti u svakom trenutku. U tu svrhu pritisnite tipku za pauzu.

Aktualne postavke prikazane su na ekranu.

## Automatski programi za masažu


Masažna fotelja ima 3 automatska masažna programa Relax, Refresh, Therapy i masaža zrakom pod pritiskom. Ovi automatski programi masiraju Vaša kompletna leđa kombinacijom masaže na gnječenje, lupkanje, rotirajuće i shiatsu masažom.

### Relax



pritisnite tipku Relax .  
Počinje automatski masažni program.  
Ukupna dužina trajanja 15 minuta. Nakon toga, masažna stolica prelazi u Standby-modus.

### Refresh

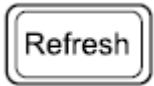

> pritisnite tipku Refresh .  
Počinje automatski masažni program.  
Ukupna dužina trajanja 15 minuta. Nakon toga, masažna stolica prelazi u Standby-modus.

### Lower Back – donji dio leđa



> pritisnite tipku Therapy .  
Počinje automatski masažni program.  
Ukupna dužina trajanja 15 minuta. Nakon toga, masažna stolica prelazi u Standby-modus.

### Masažni programi



**Gnječenje**  
> pritisnite tipku za masažu .  
Počinje masažni program.  
Ukupna dužina trajanja 15 minuta. Nakon toga, masažna stolica prelazi u Standby-modus.



**Lupkanje**  
> Pritisnite tipku za masažu .  
Počinje masažni program.  
Ukupna dužina trajanja 15 minuta. Nakon toga, masažna stolica prelazi u Standby-modus.



**Gnječenje i lupkanje**  
> Pritisnite tipke za masažu i .  
Masažu na gnječenje i lupkanje je moguće zajedno aktivirati.



**Shiatsu**  
> Pritisnite tipku za masažu .  
Počinje masažni program.  
Ukupna dužina trajanja 15 minuta. Nakon toga, masažna stolica prelazi u Standby-modus.



**Rotiranje**  
> Pritisnite tipku za masažu .  
Počinje masažni program.  
Ukupna dužina trajanja 15 minuta. Nakon toga, masažna stolica prelazi u Standby-modus.

### Auto Air – Masaža vazduhom pod pritiskom za područje za sjedenje, listove i stopala



> Pritisnite tipku za masažu .  
Počinje masažni program vazduhom pod pritiskom.  
Ukupna dužina trajanja 15 minuta. Nakon toga, masažna stolica prelazi u Standby-modus.

### Masaža za posebnim fokusom (težištem)



Za vrijeme trajanja aktualnog masažnog programa:  
> Pritisnite tipku Partial .  
*Počinje parcijalna masaža sa aktualnom pozicijom masažnih valjaka kao tačka težišta. Područje od 8 cm oko ove tačke se intenzivno masira.*  
> Još jednom pritisnite tipku Partial .  
*Masažni program se nastavlja.*


### Spot – Punktuerna masaža



Za vrijeme trajanja aktualnog masažnog programa:  
> Pritisnite tipku Spot .  
*Počinje punktuerna masaža sa aktualnom pozicijom masažnih valjaka kao tačka težišta. Neposredno oko ove tačke se intenzivno masira.*  
> Još jednom pritisnite tipku Spot .  
*Masažni program se nastavlja.*

### Podšavanja

#### Strenght – jačina, za masažu na gnječenje i lupkanje

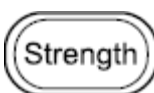


Moguće je podesiti jačinu lagano, srednje, jako i isključiti.  
> Pritisnite tipku Strenght za vrijeme automatskog masažnog programa, gnječenja i lupkanja.  
*Svakim pritiskom birate slijedeću postavku.*

Width – rastojanje između masažnih valjaka




Moguće je podesiti rastojanje usko, srednje i široko.

- Pritisnite tipku Strength  za vrijeme masaže na lupkanje i rotiranje. *Svakim pritiskom birate slijedeću postavku.*


**Pozicija valjaka prema gore**



- Pritisnite tipku prema-gore  za vrijeme parcijalne i punktualne masaže. *Masažni valjci pokreću se prema gore.*

**Pozicija valjaka prema dolje**




- Pritisnite tipku prema-dolje  za vrijeme parcijalne i punktualne masaže. *Masažni valjci pokreću se prema dolje.*

**Masaža vazduhom pod pritiskom, Intenzitet**



Moguće je podesiti lagano, srednje, jako i isključiti.

- Pritisnite tipku Intensity . *Svakim pritiskom birate slijedeću jačinu.*

**Masaža vazduhom pod pritiskom, stopala**



Moguće je podesiti uključiti i isključiti.

- Pritisnite tipku Feet . *Svakim pritiskom ova funkcija se uključuje ili isključuje.*

**Masaža vazduhom pod pritiskom, noge**



Moguće je podesiti uključiti i isključiti.

- Pritisnite tipku Legs . *Svakim pritiskom ova funkcija se uključuje ili isključuje.*

**Masaža vazduhom pod pritiskom, sjedalo**



Moguće je podesiti uključiti i isključiti.



- Pritisnite tipku Seat . *Svakim pritiskom ova funkcija se uključuje ili isključuje.*

**Pozicione tipke za poziciju siedenja i ležanja**

Ove funkcije moguće je uključiti sa i bez uključenom funkcijom masaže.



Poziciona tipka **Naslon za noge prema gore**



- Pritisnite pozicionu tipku  i držite je pritisnutom. Naslon za noge se podiže.
- Pustite pozicionu tipku . Naslon za noge ostaje u trenutnoj poziciji.



Poziciona tipka **Naslonjač za leđa prema gore**



- Pritisnite pozicionu tipku  i držite je pritisnutom. Naslonjač za leđa se podiže.
- Pustite pozicionu tipku . Naslonjač za leđa ostaje u trenutnoj poziciji.



Poziciona tipka **Naslon za noge prema dolje**



- Pritisnite pozicionu tipku  i držite je pritisnutom. Naslon za noge se spušta.
- Pustite pozicionu tipku . Naslon za noge ostaje u trenutnoj poziciji.

Poziciona tipka **Naslonjač za leđa prema gore**



- Pritisnite pozicionu tipku  i držite je pritisnutom. Naslonjač za leđa se spušta.
- Pustite pozicionu tipku . Naslonjač za leđa ostaje u trenutnoj poziciji.

## 5. Rad

### ⚠ Upozorenje!

- Ambalažu držite van dometa djece. Postoji opasnost od gušenja.
- Prije nego što upalite masažnu fotelju, pročitajte poglavlje sa sigurnosnim napomenama.

### ⚠ Pažnja!

- Masažna fotelja može da uništi pod. Ispod fotelje stavite odgovarajuću podlogu, koja se ne kliže.

### Mjesto za postavljanje fotelje

- Masažnu fotelju postavite na stabilnu i ravnu podlogu.
- Ispred i iza masažne fotelje uklonite sve predmete, kako bi naslonjač i podlogu za noge mogli slobodno da rastvorite.


### Raspakivanje i sastavljanje

Masažna fotelja MC5000 se isporučuje pakovana u kartonu.

### ⚠ Pažnja!


Izbjegavajte korištenje oštrih i špicastih alata (noževe za tepihe) da bi uklonili ambalažu.

### Korak 1

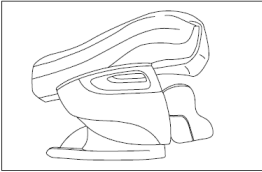


- > Otvorite karton i primite masažnu fotelju na označenim mjestima.
- > Fotelju izvadite iz kartona.  
Za ovo su potrebne 4 osobe.
- > Oprezno i u potpunosti uklonite ambalažu sa fotelje.

### Korak 2

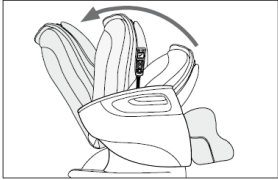


- > Naslon za leđa rasklopite prema gore u poziciju za sjedenje sve dok se brava ne uglavi.  
*Naslon za leđa je sada na cca 115°.*

### Korak 3

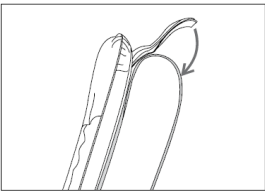

- > Donji dio jastuka za leđa i stražnji dio jastuka za sjedalo spojite pomoću rajsveršlusa.
- > Jastuk za sjedalo zajedno sa jastukom za leđa položite na masažnu fotelju.
- > Zatvaračem pričvrstite jastuk za leđa za naslonjač za leđa.

### Korak 4

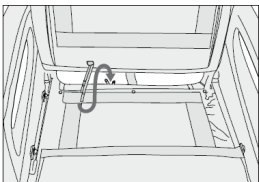


- > Jastuk za sjedalo prebacite prema nazad ka naslonjaču za leđa.
- > Crijeva za zrak iza sjedala povežite sa crijevima za zrak na jastuku za sjedalo.  
Crveno označeno crijevo spojite sa crveno označenim priključkom.  
Bijelo označeno crijevo spojite sa bijelo označenim priključkom.
- > Jastuk za sjedalo vratite na sjedalo.



Važno! Crijeva nemojte priklještavati. Postavite ih tako, da se ne preklapaju i ne prelamaju.

### Korak 5



- > Utikač priključiti u utičnicu.
- > Uključiti glavni prekidač dolje na poledini.
- > Masažnu fotelju uključiti pritiskom na tipku Ein/Aus (on/off)  na ručnom upravljaču.  
*Masažna fotelja je sada spremna za rad.*

## 6. Rukovanje

### ⚠ Upozorenje!

- Prije nego što upalite masažnu fotelju, pročitajte poglavlje sa sigurnosnim napomenama.

### ⚠ Pažnja!

- Ukoliko dođe do bilo kakve vrste iritacija, masažu odmah prekinite.

### ⓘ Važno!

- Jastuk za sjedalo i leđa nikada nemojte skidati za vrijeme masaže.

### Opasnost od prevrtanja!

- Uvijek sjedajte uspravno i oprezno na fotelju. Na fotelju nikada nemojte sjedati u ležećem položaju.

### Prije uključivanja

- Za vrijeme masaže nosite udobnu odjeću.

- Uklonite sve predmete iz Vaših džepova (n.pr. ključevi, džepni noževi, mobilni telefoni).
- Zauzmite udoban položaj.
- Sjednite na sredinu fotelje tako da Vam je kičma tačno između masažnih glava.
- Za vrijeme masaže jastuk za leđa možete prebaciti prema natrag.
- Za vrijeme masaže naslonjač za leđa je moguće pomaknuti prema natrag.
- Masaža u svakom trenutku treba da bude ugodna i opuštajuća. Masažu odmah prekinite ili promijenite poziciju sjedenja, ukoliko Vam masaža postane bolna ili neugodna.
- Ukoliko duže vrijeme ne koristite masažnu funkciju fotelje, onda prije ponovnog korištenja ponajprije provjerite stanje fotelje.
- Leđa blago pritisnite na naslonjač za leđa. Ponajprije provjerite da li je masaža ugodna.
- Težinu polako pritišćite prema natrag sve dok je masaža ugodna.


### Pokretanje masaže

> Pritisnite tipku Ein/Aus (on/off) na ručnom upravljaču. Nakon uključivanja masažna fotelja ide u srednji ležeći položaj. Sada možete da odaberete jedan od masažnih programa.

- Nakon odabira jednog od automatskog masažnog programa (Relax, Refresh ili Therapy) fotelja opipava kompletna leđa kako bi odredila veličinu korisnika.
- Nakon odabira jednog od masažnih programa (gnječenje, lupkanje, rotiranje ili Shiatsu) moguće je dodatno priključiti masažu zrakom pod pritiskom.
- Pritisnite tipku Intensity kako bi podesili ili isključili intenzitet masaže zrakom pod pritiskom.
- Moguće je odvojeno uključiti odnosno isključiti masažu zrakom pod pritiskom za sjedalo, noge i stopala.

▷ tipke za masažne programe

### Ležeći položaj / sjedeći položaj

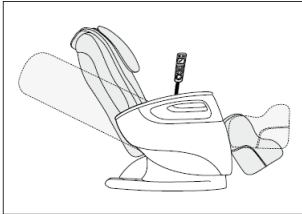

- > Postaviti fotelju u željeni ležeći položaj. Moguć je vodoravni ležeći položaj.
- Moguće je odvojeno podići ili spustiti naslon za noge i naslonjač za leđa.
- Ove funkcije moguće je podesiti bez ili sa uključenom masažom.

▷ Poziciona tipka za sjedeći i ležeći položaj

### Gašenje masažne fotelje

Nakon isteka masažnog programa masažna fotelja automatski prelazi u Standby-modus.

Za vrijeme masaže fotelju možete u svakom trenutku zaustaviti pritiskom na tipku Ein/Aus (on/off). Masažna fotelja vraća se u početnu poziciju. Prikaz za rad fotelje treperi.


- > Masažnu fotelju isključite na glavnom prekidaču ispod naslonjača za leđa.
- > Kabal isključite iz struje.

### ! Pažnja!

Uređaj koristite najviše 15 minuta bez pauze i ne više, jer u suprotnom postoji opasnost od pregrijavanja. Prije ponovne upotrebe ostavite da se uređaj ohladi 30 minuta.


### Ostale postavke

#### Funkcija preklapanja / sklapanja

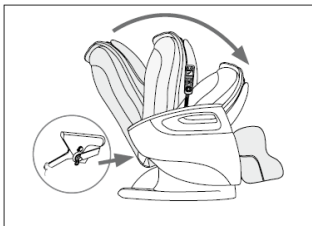

- Kako bi sklonili stolicu i pri tome uštedjeli mjesto, fotelju je moguće sklopiti.
- > Pritisnuti tipku Ein/Aus (on/off) na ručnom upravljaču. Fotelja se odmah vraća u početni položaj.
- > Čim se fotelja vrati u početni položaj, fotelju isključite na glavnom prekidaču.
- > Isključiti adapter iz struje.
- > Deblokirati zaključavanje/blokadu na poleđini naslonjača za leđa.
- > Naslonjač za leđa oprezno sklopiti prema naprijed na sjedalo.
- Prethodno po potrebi jastuk za leđa prebaciti unatrag preko naslonjača za leđa.

### Koturaljke za transport

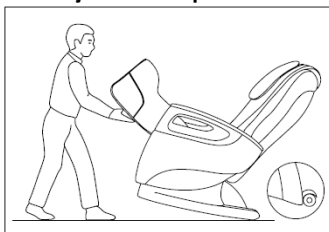

- Ova masažna fotelja ima koturaljke na stražnjoj strani.
- Iste omogućavaju jednostavan transport na ravnoj površini.
- Pažnja! Koristite podmetač kako bi ste spriječili oštećenja na Vašem podu.

## 7. Čišćenje i čuvanje

### ! UPOZORENJE

- Nakon svake upotrebe i prije svakog čišćenja, masažnu fotelju ugasite na ručnom upravljaču.
- Kabal isključite iz struje.

- > Fotelju obrišite suhom ili vlažnom krpom.
- > Svaka 2-3 mjeseca koristite čistu krpu sa nešto sredstva za čišćenje površina od umjetnih materijala.
- > Nakon toga, fotelju posušite suhom i čistom krpom.

Umjetna koža je osjetljiva na ulja i masnoću. Ovu masažnu fotelju čistite samo sa provjerenim sredstvima za njegu umjetnih tkanina.

**Važno!**

- Fotelju čistite samo na navedeni način.
- Ni u kom slučaju tečnost ne smije da uđe u uređaj.
- Nemojte koristiti sredstva koja sadrže otapala.
- Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje. Ista mogu uništiti površinu fotelje.

**8. Šta činiti u slučaju problema?**

| Problem  | Uzrok   | Rješenje   |
|--|---|--|
| Zvuk trenja se javlja za vrijeme rada                                | Ovi zvukovi su normalni i javljaju se usljed rada motora ili rada masažnih glava, radi trenja o materijal | Nije potrebno ništa raditi.  |
| Masaža se ne može pokrenuti  | Masažna fotelja nije uključen u struju.   | Uključite fotelju sa masažom u struju.                               |
|  | Masažna fotelja nije uključena na glavnom prekidaču.  | Masažnu fotelju uključiti na glavni prekidač.                        |
|  | Osiguranje na masažnoj fotelji prekinulo je napajanje na struju.  | U ovom slučaju molimo da kontaktirate Vašeg ovlaštenog distributera. |
| Nije moguće podići ili spustiti naslonjač za leđa ili naslon za noge | Naslonjač za leđa ili naslon za noge su opterećeni ili blokirani.   | Ukloniti objekte koji blokiraju uređaj.                              |
| Funkcija masaže se zaustavi tokom rada stolice.                      | Aktivirana je zaštita od pregrijavanja.   | Ugasite masažnu fotelju i pustite da se ohladi 30 minuta.            |
|  | Vrijeme masaže je isteklo.  | Nakon toga, ponovo je upalite.                                       |

**9. Tehnički podaci**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Naziv proizvoda          | Masažna fotelja MC5000                    |
| Napon struje/frekvencije | 220-240 V ~ 50-60 Hz                      |
| Utrošak energije         | 200 W                                     |
| Dimenzije                | dužina 191 cm, širina 73 cm, visina 64 cm |
| Težina                   | neto 61 kg, sa ambalažom 76 kg            |
| Maksimalna nosivost      | 200 kg                                    |

Ekskluzivni zastupnik i distributer za BiH:



Tel: +387 33 761 140 Fax: +387 33 761 142  
 Blažujski drum 24, 71000 Sarajevo, BiH  
 info@unalijek.com

www.unalijek.com