

# beurer

## Mini masažer MG 16

### Uputstvo za upotrebu



Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.

Srdačni pozdravi,  
Vaš Beurer tim

#### 1. Upotreba prema svrsi namjene

Ovaj uređaj namijenjen je za svrhu opisanu u ovom uputstvu. Proizvođač ne odgovara za štete nastale nestručnim i nemarnim korištenjem.

Ovaj uređaj namijenjen je za masažu pojedinih dijelova ljudskog tijela. Nemojte koristiti mini masažer ukoliko se jedna ili više od sljedećih napomena odnose na Vas.

#### UPOZORENJE

Ovaj mini masažer nemojte koristiti

- na djeci,
- na mjestima gdje su promjene uzrokovane oboljenjima ili ozljedama (kao što su opekotine, rane, ožiljci, osip ili druge ozljede),
- kod oboljenja cirkulacije i glavobolja,
- na glavi, kostima (n.pr. zglobovima, kičmi) ili drugim osjetljivim dijelovima tijela,
- nakon operacija,
- za vrijeme trudnoće,
- nakon uzimanja lijekova ili konzumiranja alkohola (umanjena percepcija!)
- za vrijeme rada na mašinama.

Koristite ga samo za vanjsku upotrebu.

Ovaj uređaj nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući djecu) sa ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i/ili znanja, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili su od nje dobili upute kako da koriste uređaj.

Ovaj uređaj nije zamjena za konzultacije za doktorom ili liječenje.

Prije upotrebe konzultirajte se sa dvojim doktorom:

- ako imate ugrađen pejsmejker, implantate ili druga pomagala,
- kod bolova nepoznatog uzroka,
- ukoliko niste sigurni da li je ovaj uređaj pogodan za vas.

#### Napomena

Masaža u svakom trenutku treba da bude ugodna i opuštajuća. Odmah prekinite masažu ili promijenite poziciju ili pritisak ukoliko je masaža postala bolna ili neugodna.

#### 2. Sigurnosne napomene

##### UPOZORENJE

- Prije upotrebe uvjerite se da uređaj ili pribor nemaju vidljivih oštećenja. Ako sumnjate na moguća oštećenja, uređaj nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili servisu za kupce.
- Nemojte koristiti dodatke, koje Vam nije preporučio proizvođač.
- Uređaj ne smijete otvarati i popravljati, jer tada neće biti osiguran ispravan rad uređaja. U slučaju ne poštivanja garancija ne vrijedi. Za sve popravke obratite se Beurer-ovom servisu za kupce ili ovlaštenom trgovcu.

#### 3. Rukovanje

Umetanje odnosno zamjena baterija:

- Odvrnite poklopac na pretincu za baterije u suprotnom smjeru od kazaljke na sat.
- Ispravno umetnite tri alkalne ili normalne baterije tipa AAA. Pazite da ispravno okrenete baterije.
- Zatvorite poklopac na pretincu za baterije. Pazite da poklopac ispravno stavite.

Pritisak na tipku

- ① 1x upaliti
- ① 2 x ugasiti

Napomena za korištenje baterija

Pazite da baterije ne dođu u ruke djece. Djeca bi mogla da progutaju baterije i time bi se prouzrokovali ozbiljni zdravstveni problemi. U ovom slučaju odmah otiđite kod doktora!

- Normalne baterije ne smijete puniti, zagrijavati ili bacati u otvorenu vatru (opasnost od eksplozije!).
- Uvijek istovremeno zamijenite sve baterije i koristite baterije istog tipa.
- Curenje baterije može prouzrokovati oštećenja na uređaju. Kada duže vrijeme ne koristite uređaj, molimo da izvadite baterije iz njega.
- Nemojte koristiti baterije na punjenje!

#### 4. Čišćenje i održavanje

Vaš masažer nije potrebno održavati. Jedino je potrebno redovno čistiti kućište. Kada čistite masažer, izvadite baterije iz njega.

Za čišćenje mini masažera koristite blago navlaženu krpu.

- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje.
- Masažer ni u kojem slučaju nemojte uranjati u vodu, jer bi voda mogla da uđe u unutrašnjost masažera i na taj način ga oštetila.

