

Beurer MG 70

Infracrveni masažer



Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerena težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.


Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim

1. Važna upozorenja

- Uređaj priključite samo na onaj napon naveden na tipskoj pločici.
- Kao i svaki drugi električni uređaj, i ovaj masažer koristite pažljivo da bi izbjegli opasnost od strujnog udara:
 - Isključite kabal iz struje odmah nakon korištenja.
 - Izbjegavajte svaki kontakt sa vodom (osim kada čistite s vlažnom krpom!). Voda ne smije ući u uređaj. Nikada ne uranjajte uređaj u vodu. Ni u kom slučaju nemojte koristiti uređaj u kadi, pod tušem, u bazenu ili iznad vodom napunjenog sudopera. Ukoliko ipak uđe voda u kućište, uređaj odmah isključite iz struje i obratite se svom trgovcu elektronike ili servisu za kupce.
 - Prije svakog korištenja provjerite uređaj i kabal na moguća oštećenja.
 - U slučaju oštećenja, kabal ni u kojem slučaju ne smijete uključivati u struju. Obratite se svom trgovcu elektronike ili servisu za kupce. Popravke smiju vršiti samo servisi za kupce ili ovlašteni trgovci.
 - Nikada nemojte nositi ili čuvati uređaj za kabal.
 - Ako se pojave smetnje za vrijeme rada masažera, odmah ga isključite iz struje.
- Ovaj uređaj namijenjen je za svrhu opisanu u ovom uputstvu. Proizvođač ne odgovara za štete nastale nestručnim i nemarnim korištenjem.
- Koristite samo isporučene priključke za masažu.
- Uređaj je namijenjen za ličnu (privatnu) upotrebu, a ne za medicinsku ili komercijalnu.
- Uređaj nemojte koristiti duže od 20 minuta neprestano da bi izbjegli pregrijavanje. Prije ponovne upotrebe ostavite da se uređaj ohladi.
- Površina uređaja grije se za vrijeme upotrebe. Osobe neosjetljive na toplotu trebaju biti dodatno oprezne.
- Ne prekrivajte uređaj kad radi (deke, jastuci, ...).
- Nemojte gurati predmete kroz otvore u uređaju. Uvjerite se da se pokretni dijelovi uređaja mogu kretati slobodno i da nisu priklješteni predmeti ili čak prsti. Uvjerite se da se nisu dlake zapetljale za uređaj. Po potrebi nosite mrežicu za kosu.
- Isključite uređaj i izvucite kabal iz struje kada skidate ili stavljate ručku ili priključke za masažu.
- Uređaj ne smije da radi bez nadzora, pogotovo kada su djeca u blizini.
- Djeca, invalidne i nemoćne osobe mogu koristiti masažer samo pod nadzorom odrasle osobe ili se iste prethodno moraju upoznati sa radom masažera.
- Masažer nemojte koristiti na životinjama.
- Molimo osobe sa ugrađenim pejsmejkerom da prije korištenja masažera konzultiraju svog doktora i ni u kojem slučaju masiraju područje oko srca.
- Nikada nemojte koristiti uređaj na otečenoj, oštećenoj ili koži sa opekotinama.
- Osim toga, slijedeće dijelove ne smijete masirati: kosti (n.pr. zglobove, kičmu), glavu ili druge osjetljive dijelove tijela.
- Nemojte se masirati ukoliko imate prehladu praćenu temperaturom, proširenje vene, trombozu, upalu vena, žuticu, dijabetes, u trudnoći, oboljenje živaca (n.pr. išijas) ili akutne upale. Konzultirajte svog doktora u ovim slučajevima.
- Masažer nemojte koristiti u krevetu. Za vrijeme masaže ne smijete zaspati.

2. Opis aparata

A	regulator (podesiva brzina masaže)		
B	klizni šalter OFF – isključeno M – masaža M+H – masaža i infracrveno zagrijavanje		
C	masažna površina sa infracrvenim zagrijavanjem		
D	držač za trakicu za nošenje		
E	tipke za zaključavanje ručke		
F	kabal		
G	gumena ručka na skidanje		
H	izmjenjivi priključci za masažu: - mekani priključak - priključak u obliku kvrčica	I	masažna glava
		J	traka
		K	priključni element

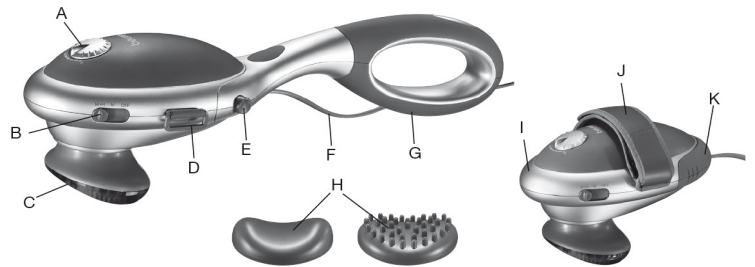

3. Korištenje

Namjena: Ovaj uređaj služi isključivo za masažu ljudskog tijela. Odlučite da li želite masažu sa ručkom ili želite da koristite masažer sa trakom. Za skidanje ručke trebate pritisnuti tipke za zaključavanje ručke i izvucite ručku iz masažne glave. Uvucite priključni element u zadnjem dijelu masažne glave da bi prekrili uređaj za pričvršćivanje ručke. Sada uvucite ruku ispod trake. Podesite traku tako da dlanom prihvatite masažnu glavu i slobodno njome upravljate.

Ako želite da vratite ručku, ponajprije izvucite priključni element i stavite ručku tako da čujete klik. Kabal se pojavljuje ispod aretiranja ručke.

Masažu možete vršiti sa ili bez priključaka za masažu. Da biste to učinili, odaberite priključak za masažu. Tokom tretmana sa infracrvenom toplotom „M+H“ masažni priključci ometaju prijenos toplote iz infracrvenog izvora. Zbog toga, preporučujemo da uređaj radi na programu „M“ samo kada je masažni priključak priključen. Uvjerite se da je uređaj isključen prije nego kabal priključite u struju. Uključite uređaj kliznim šalterom na „M“ – „samo masaža“ ili na „M+H“ – „masaža i infracrveno zagrijavanje“. Podesite željenu brzinu masaže uz pomoć regulatora. Uređaj koristite na željenom dijelu tijela. Možete stajati, sjediti ili ležati i sami sebe ili druge masirati. Jačim ili blažim pritiskom masažerom možete da promijenite intenzitet masaže. Nemojte masirati jedan određeni dio tijela duže od 3 minute, masirajte nakon toga neki drugi dio tijela. Nakon upotrebe do 20 minuta isključite masažer, izvucite kabal iz struje i ostavite uređaj da se ohladi. Uređaj uvijek čuvajte na suhom mjestu.

4. Čišćenje

Za čišćenje uređaja koristite blago navlaženu krpu. Možete dodati nešto blagog sredstva za čišćenje. Uvijek obratite pažnju da voda ne dospije u unutrašnjost uređaja. Uređaj koristite tek kada se u potpunosti osuši.