

BeurerGS 10

Staklena vaga




Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka. Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujujte upozorenja.


Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim

Uputstvo za upotrebu


1. Rad vage

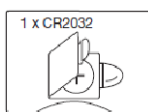

Umetnite bateriju odnosno skinitezaštitnu foliju.

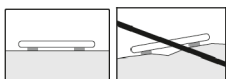


Vagu postavite na ravnu i čvrstu površinu.

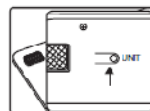


kg → lb → St
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb

Moguće je promijeniti jedinicu mjere na vagi.




2. Vaganje

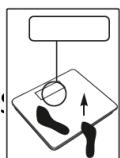

na vagu!

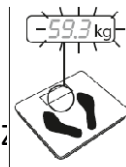

vaganja stojte mirno!

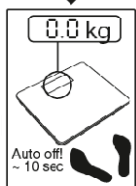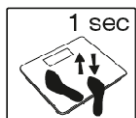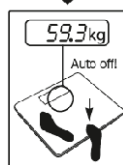


: Kod prvog korištenja i
njesta stajanja vage.




3. Javljanje grešaka

Baterija je prazna.

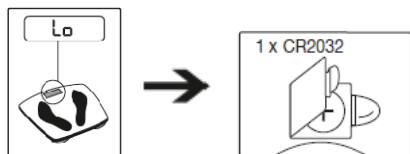

Prekoračena je maksimalna nosivost vage.

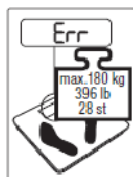

Opće napomene

- Vagu možete opteretiti do maksimalnih 180 kg (396 lb/28 st), podjela 100 g (0,2 lb/0,01 st).
- Čišćenje: Vagu možete čistiti vlažnom krpom na koju po potrebi možete staviti nešto blagog sredstva za čišćenje. Nikada nemojte uranjati vagu pod vodu. Nikada nemojte vagu prati pod mlazom vode.
- Vagu zaštitite od udaraca, vlage, prašine, hemikalija, jakih temperaturnih oscilacija, elektromagnetnih polja i blizine izvora toplote.
- Nikada nemojte stajati na vanjski rub vage: opasnost od prevrtanja!
- Ambalažu držite van dometa djece!
- Vaga nije predviđena za komercijalnu upotrebu.
- Ukoliko imate pitanja vezano za upotrebu vage, molimo da se obratite vašem trgovcu ili ovlaštenom zastupniku.
- Prije svake reklamacije molimo da provjerite istrošenost baterija i iste po potrebi zamijenite.
- Opravke vage smije vršiti samo ovlašteni servis ili trgovac.
- Prazne baterije bacajte u posebne kante, u sakupljališta ili ih vratite specijaliziranom trgovcu. Zakonski se obavezni da ovako bacate baterije.
- Napomena: Ovi znakovi nalaze se na baterijama koje sadrže štetne materije:

Pb = baterija sadrži olovo,

Cd = baterija sadrži kadmij,

Hg = baterija sadrži živu.



• Molimo da vagu odlažete u skladu sa Odredbama za stare električne i elektronske aparate 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“). U slučaju pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću

