

beurer MG 55

Uputstvo za upotrebu



Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan od proizvoda iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i pošaljete upozorenja.

Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim

Obim isporuke:

- Masažer
- 3 izmjenjiva nastavka za masažu
- Ovo uputstvo za upotrebu

UPOZORENJE

- Uređaj je namijenjen za kućnu upotrebu. Uređaj nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od preko 8 godina i osobe sa smanjenim psihičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i znanja, samo ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili su od te osobe dobile uputstvo kako da koriste uređaj i razumiju opasnosti koje mogu da se dese.
- Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

- Ukoliko dođe do oštećenja kabla, uređaj treba odložiti. Ukoliko kabal nije moguće zamijeniti, uređaj bacite.
- Ovaj uređaj imaju toplu površinu. Osobe koje su osjetljive na toplotu, moraju biti pažljive prilikom korištenja.

Opis simbola

Slijedeći simboli se pojavljuju u uputstvu za upotrebu:



UPOZORENJE

Upozorenje na mogućnost povrede ili opasnosti za Vaše zdravlje.



PAŽNJA

Sigurnosna napomena na moguća oštećenja na uređaju/priboru.



Napomena

Napomena o važnim informacijama.



Aparat je duplo izoliran i ispunjava uslove zaštite klase 2.

1. O uređaju

Ovaj električni uređaj Vam pruža umirujuću masažu. Masaža može biti opuštajuća ili stimulirajuća, i pomaže kod liječenja krutih ili napetih mišića, bolova i umora. Uređaj Vam pruža jake i intenzivne masaže za leđa.

Uređaj je za privatnu upotrebu, i nije namijenjen za medicinske ili komercijalne svrhe.

2. Pravilna upotreba

Uređaj je namijenjen za masiranje individualnih dijelova tijela i nije zamjena za medicinske tretmane. Uređaj nemojte koristiti ukoliko se bilo koja stavka upozorenja odnosi na Vas. Ukoliko imate sumnje da li Vam uređaj odgovara, molimo da se konsultujete sa ljekarom.



UPOZORENJE

Ovaj masažer nemojte koristiti

- Na životinjama.
- Kod osoba koje pate od diskus hernije ili od abnormalnih promjena u kralježnici.
- Ukoliko imate ugrađen pejsmejker, uređaj nikada nemojte koristiti u području oko srca. Uvijek se konsultujte sa doktorom prije korištenja uređaja i na drugim predjelima tijela.
- Uređaj nemojte koristiti na nateknutoj, upaljenoj, povrijeđenoj koži i dijelovima tijela ili dijelovima sa opekotinama,
- Za vrijeme trudnoće.
- na licu (oči), na grkljanu ili drugim posebno osjetljivim dijelovima tijela,
- za vrijeme spavanja,
- nakon uzimanja lijekova ili alkohola (ograničena sposobnost opažanja!),

Konsultujte se sa Vašim liječnikom posebno ako

- bolujete od neke ozbiljne bolesti ili ste u procesu oporavka od operacije.
- Patite od nečega navedenog u nastavku: prehlada popraćena groznicom, varikozne vene, tromboza, flebitis, žutica, dijabetes, bolesti živčanog sustava (npr. Išijas) ili akutne upale.

Masažer je predviđen isključivo sa svrhu opisanu u ovom uputstvu. Proizvođač ne može garantirati za štete uzrokovane nestručnom ili nepažljivom upotrebom.

1. Sigurnosni savjeti

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Nepoštivanje slijedećih uputa može uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine. Sačuvajte ovo uputstvo i učinite ga dostupnim drugim korisnicima. Predajte ovo uputstvo prilikom prosljeđivanja aparata.



UPOZORENJE

Ambalažu aparata držite dalje od dometa djece. U suprotnom postoji opasnost od gušenja.



UPOZORENJE: strujni udar

Kao i bilo koji drugi električni aparat, i ovim masažnim aparatom trebate rukovati s pažnjom i oprezom kako bi spriječili rizik od strujnog udara.

Stoga masažer:

- koristite samo napon struje naveden na adapteru,
- nikada nemojte koristiti masažer ukoliko na sebi ima vidna oštećenja, isto važi i za opremu.
- nemojte koristiti za vrijeme nevremena.

Masažer odmah ugasite i isključite iz struje u slučaju kvara ili zastoja u radu. Nemojte vući kabal iz utičnice ili iz masažera kako bi isti ugasili. Nikada nemojte nositi ili držati aparat na kablu. Držite kabal podalje od vrućih površina. Uređaj nikada ne otvarajte bez razloga. Ukoliko je kabal oštećen, potrebno je izvršiti zamjenu od strane proizvođača ili ovlaštenog servisa.

Pobrinite se da masažer, prekidač i kabal ne dođu u dodir sa vodom, parom ili drugim tečnostima.

Stoga masažer koristite samo:

- U suhim prostorijama,
- Sa suhim rukama,
- Nikada u kupatilu, pod tušem ili u blizini umivaonika,
- Nikada u bazenima ili saunama,
- Nikada vani, na otvorenom.

Nikada nemojte posezati za masažerom ako je pao u vodu. U tom slučaju masažer odmah isključite iz struje.



Popravke

UPOZORENJE

Popravke električnih aparata vrše samo stručna lica. Nestručne popravke mogu prouzrokovati znatne opasnosti kod korisnika. U slučaju popravki obratite se stručnom servisu ili ovlaštenom trgovcu.



UPOZORENJE: Opasnost od požara

Postoji opasnost od požara u slučaju nepravilne upotrebe odnosno nepridržavanja ovog uputstva!

Stoga Vas molimo da poštujete sljedeće upute:

- Nikada uređaj nemojte koristiti duže od 15 minuta (rizik od pregrijavanja) i ostavite uređaj da se ohladi na 15 minuta prije ponovnog korištenja.
- Nikada uređaj ne ostavljajte bez nadzora, pogotovo ukoliko u blizini ima djece.
- Uređaj nikada nemojte koristiti ispod prekrivača, kao što su deke ili jastuci...



Rukovanje

PAŽNJA

Nakon svake upotrebe i prije svakog čišćenja masažer ugasite i isključite.

- Pobrinite se da se svi pokretni dijelovi mogu slobodno kretati.
- Pobrinite se da u uređaj ne dospije kosa.
- Izbjegavajte kontakt sa oštrim ili šiljastim predmetima.
- Kabal nemojte uklještit.
- Pobrinite se da uređaj nije preblizu izvora toplote kao što su pećnice, radijatori ili izravna sunčeva svjetlost.




Odlaganje

OPREZ

Zbog zaštite okoliša, nemojte odlagati uređaj u kućni otpad. Slijedite lokalne propise za odlaganje ove vrste materijala. Masažer odlazite u skladu sa Odredbom za stare električne i elektronske aparate 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). U slučaju pitanja molimo da se obratite lokalnoj službi nadležnoj za zbrinjavanje otpada.



4. Opis uređaja

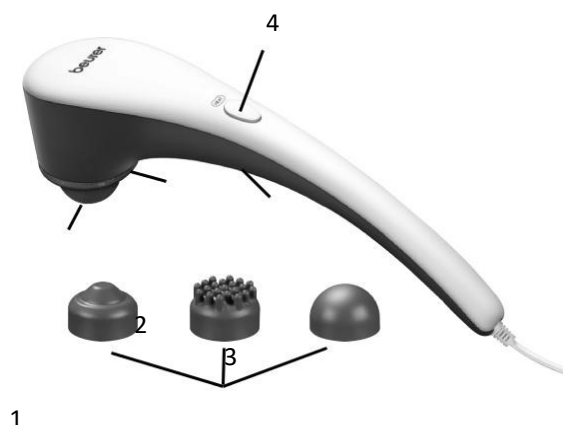

1. Glava masažera
2. Opcija zagrijavanja
3. Tipka za paljenje/ gašenje (on/off); kontrola (kontinuirano podešavanje intenziteta masaže)
4. Opcija zagrijavanja (zagrijavanje infracrvenim svjetlom)
5. Zamjenjivi nastavci za masažu

5

5. Pokretanje

- Uklonite ambalažu.
- Pogledajte da li su uređaj, kablovi i napojna jedinica oštećeni.
- Uređaj priključite na utičnicu. Uređaj mora biti ugašen.
- Kabal usmjerite tako da se niko ne sapliće na njega.

6. Rad

Pobrinite se da je uređaj isključen prilikom uključivanja u utičnicu. Uređaj uključite okretanjem upravljača u smjeru kazaljke na satu. Podesite odgovarajuću jačinu. Opciju zagrijavanja možete aktivirati tako što pritisnete tiplku „Heat“.

Nastavke na masažeru mijenjate tako što nastavak rotirate u smjeru suprotno od kazaljke na satu i zamijenite. Pričvrstite novi nastavak koji ste odabrali tako što ćete ga okrenuti u smjeru kazaljke na satu. Uređajem rukujte sa obje ruke na području tijela koje želite izmasirati. Možete stajati, sjediti, ležati i masirati sebe ili druge osobe. Intenzitet masaže može se mijenjati pritiskanjem više ili manje čvrsto pomoću uređaja za masažu. Nemojte masirati određeni dio tijela duže od 3 minute i potom promijenite područje.



Napomena

Uređaj nemojte koristiti neposredno pred odlazak na spavanje. Masaža također može imati poticajni učinak i može uzrokovati poteškoće u spavanju.



Upozorenje

- Masaža u svakom trenutku treba da bude ugodna i opuštajuća. Ukoliko osjećate da je masaža bolna ili neugodna, prekinite masažu ili promijenite položaj ili pritisak na masažer.

7. Čišćenje i skladištenje

Čišćenje

Uređaj isključite iz struje i pustite da se ohladi. Onda možete očistiti uređaj lagano mokrom krpom. Možete također koristiti i male količine deterdženta.



Upozorenje

- Prije svakog čišćenja masažer isključite iz struje.
- Masažer čistite samo na navedeni način. Ni u kom slučaju tečnost ne smije da uđe u masažer ili u pribor.
- Masažer koristite tek onda kada se u potpunosti osuši.

Skladištenje

Uređaj koristite u hladnim i suhim prostorijama van dometa djece. Preporučujemo da uređaj čuvate u originalnoj ambalaži.

8. Šta činiti u slučaju problema?

Problem	Uzrok	Riješenje
Glava masažera se ne kreće	Uređaj nije priključen u struju.	Priključite uređaj na struju i uključite ga.
	Uređaj se ne okreće.	Pokrenite uređaj.
	Zaštita od pregrijavanja aktivirana.	Isključite uređaj iz struje, ostavite da se ohladi na 15 minuta i potom ga ponovo pokrenite.

9. Tehnički podaci

Dimenzije (Š/D/D)	~95/445/95 mm
Težina	~1000 g
Nominalna snaga	20 W
Nazivni napon	220-240 V ~ 50/60 Hz

Ekskluzivni zastupnik i distributer za BiH:



Tel: +387 33 761 140 Fax: +387 33 761 142
Blažujski drum 24, 71000 Sarajevo, BiH
info@unalijek.com

www.unalijek.com

