


# beurer

-Staklena vaga GS 215-

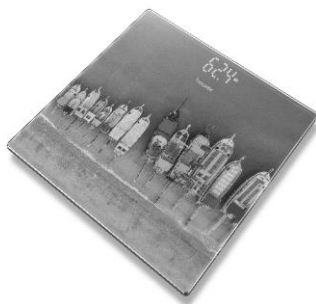


## Uputstvo za upotrebu



### 1. Početna upotreba



-Stavite baterije ili uklonite izolacijsku traku.

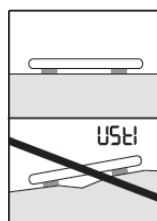


-Postavite vagu na čvrstu, ravnu površinu.

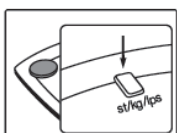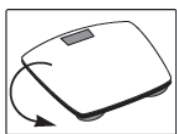

d=0,1 kg/0,2lb/1lb

-Vaga se može prebaciti na alternativne jedinice mjerenja.


### 2. Vaganje

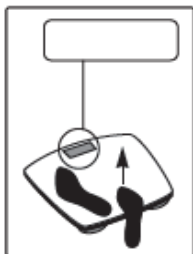

-Zakoračite na vagu.




-Stanite mirno dok se vagate

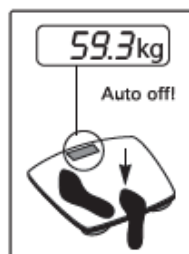


-Automatsko gašenje

### 3. Poruke o grešakama

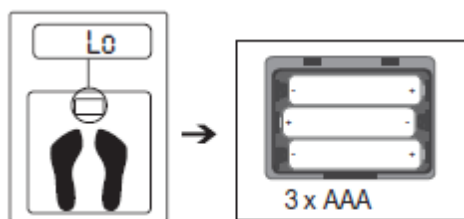

-Prazna baterija

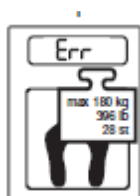


-Premašen maksimalni kapacitet težine.

#### Opći savjeti

- Maksimalni kapacitet 180 kg (396 lb / 28 st), Graducija 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Čišćenje: Možete očistiti vagu vlažnom krpom i sa malo tečnog deterdženta, ako je potrebno. Nikada ne uranjajte vagu u vodu, niti je perite pod tekućom vodom.
- Zaštitite vagu od udaraca, vlage, prašine, hemikalija, drastičnih promjena u temperaturi, elektromagnetnih polja i izvora toplote koji su u neposrednoj blizini.
- Nikada nemojte zakoračiti na vanjsku ivicu vage jednim stopalom, jer to može da izazove prevrtanje vage!
- Držite ambalažni materijal dalje od djece!
- Nije namijenjena za komercijalnu upotrebu.
- Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa radom i upotrebom naših aparata, molimo kontaktirajte lokalne prodavce ili korisnički servis.
- Prije nego što podnesete zahtjev, provjerite baterije i zamijenite ih ako je potrebno.
- Popravke moraju obavljati samo korisnički servisi ili ovlašteni dobavljači.
- Potrošene i punjive baterije ne čine uobičajen kućni otpad! Iste se smatraju toksičnim otpadom i, kao takav, treba biti odložen u specijalnim kontejnerima, mjestima za sakupljanje toksičnog otpada ili donešen prodavačima električnih uređaja.

•Napomena: Baterije koje sadrže materije označene su kako slijedi: Pb = Baterija sadrži olovo, Cd = Baterija sadrži kadmijum, Hg = Baterija sadrži živu.

Slijedite lokalna pravila koja se odnose na odlaganje materijala. Uređaj treba odložiti prema direktivi 2002/96/EC-WEEE ( Otpadna električna i elektronska oprema). U slučaju upita, kontaktirajte općinske vlasti odgovorne za odlaganje otpada na vašem području.

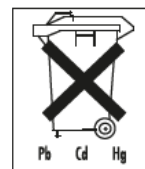

Molimo da odložite uređaj u skladu sa EC direktivom - WEEE (Otpadna električna i elektronska oprema). Ako imate bilo kakve upite, molimo kontaktirajte nadležne lokalne organe.



#### GARANCIJA I SERVIS

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (u daljem tekstu „Beurer“) daje garanciju za ovaj proizvod pod uslovima i u obimu opisanom u nastavku.

Garantni uslovi u nastavku ne utječu na zakonsku obavezu saobraznosti prodavača iz kupoprodajnog ugovora sa kupcem.

Garancija vrijedi bez obzira na obavezne odredbe zakonske odgovornosti.

Beurer daje garanciju na rad bez nedostataka i potpunost ovog proizvoda.

Garantni period u cijelom svijetu iznosi 3 godine od početka kupovine novog, nekorištenog proizvoda od strane kupca.

Ova garancija odnosi se samo na proizvode koje kupio kupac kao potrošač i koji će koristiti isključivo lično u okviru kućne upotrebe.

Vrijedi njemačko pravo.

Ako se u toku garantnog roka ovaj proizvod pokaže kao nepotpun ili se jave smetnje tokom rada u skladu odredbi u nastavku, Beurer će izvršiti besplatnu zamjenu ili popravak u skladu s ovim garantnim uslovima.

Ako kupac želi da prijavi garantni slučaj, ponajprije se treba javiti Beurer-ovoj službi za korisnike:

Beurer GmbH, centar za korisnike: 033/ 761 – 140

Nakon toga će kupac dobiti detaljnije informacije o obradi garantnog slučaja, npr. gdje može besplatno da pošalje proizvod i koja dokumentacija je potrebna.

Kupac može reklamirati proizvod ako Beureru ili ovlaštenom Beurer partneru može da predoči

- kopiju računa / potvrdu o kupovini i
- originalni proizvod.

Izričito izuzeto iz garancije su

- trošenje normalnom upotrebom ili habanje proizvoda;
- pribor isporučen uz ovaj proizvod koji se normalno troši odnosno haba kod upotrebe (npr. baterije, aku baterije, manžetne, brtvila, elektrode, sijalice/lampe, nastavci, pribor inhalatora);
- proizvodi koji se ne koriste, čiste, čuvaju ili održavaju propisno i/ili suprotno od uputstva za upotrebu i proizvodi koje je kupac ili servisni centar koji nije ovlašten od strane Beurera otvarao, popravljao ili preinačio;
- štete koje nastanu u transportu između proizvođača i kupca odnosno servisnog centra i kupca;
- proizvodi koji su kupljeni kao roba 2. klase ili kao korišteni proizvodi;
- posljedične štete koje se temelje na nedostatku ovog proizvoda (u ovakvom slučaju mogu nastati zahtjevi na osnovu odgovornosti za proizvod ili na osnovu drugih obaveznih odredbi zakonske odgovornosti).

Popravke ili zamjena proizvoda ne produžuju garantno vrijeme.